

hugsafetyスマート体温計（HFS-800B）電池について



<p>単4アルカリ乾電池（2本）をご利用ください</p>	<p>同梱している取扱説明書でご案内していますが、hugsafetyスマート体温計（HFS-800B）は単4アルカリ乾電池2本（3V）を電源としております。 充電式電池の場合、正常に動作しない場合があります。</p>
<p>電池の交換は2本同時に行ってください</p>	<p>1本だけの交換をすると放電バランスが崩れ電池の寿命が短くなる場合があります。</p>
<p>電池の減りが早いと感じたら一度電池を取り出し装填しなおしてください</p>	<p>電池の減りが早く感じられる場合、電池を一度取り出して、入れなおしてみてください。 乾電池の電極に酸化皮膜が形成され、電池が消耗していなくても使えなくなる場合があります。 その場合は電池を取り出し、入れなおすことで酸化皮膜が削れて電源が取れるようになります。</p>
<p>電池交換直後や電源ON後に一時的に電池残量が少なく表示されます</p>	<p>液晶パネルの正常作動を確認するために画面が全表示され、その際電池残量が少量で表示されます。 この表示後、すぐに電池残量マークが消えた場合は電池残量に余力がありますので継続ご利用ください。</p>

